

## Инструкция по применению.

Наименование изделия: маска санитарно-гигиеническая для медицинского персонала (далее маска).

Состав материала: марля медицинская волокнистый состав 100% хлопок.

Описание: маска многоразовая с завязками из эластичной тесьмы по боковым сторонам, состоит из 4-х слоев марли. По боковым сторонам заложены складки (по 2 на каждой стороне).

Область применения: маска предназначена для использования в медицинских и лечебных учреждениях для соблюдения санитарно-гигиенических требований и обеспечения безопасности медицинского персонала, посетителей и больных.

Способы применения: маску необходимо надеть так, чтобы она плотно закрывала рот, нос и подбородок. В случае загрязнения или увлажнения маску необходимо заменить на новую. После снятия маски обработать руки с помощью спиртосодержащего средства или вымыть их с мылом.

Рекомендуемая длительность ношения маски от 2 до 4 часов.

Способы ухода за изделием: маска может быть использована повторно после стирки и обеззараживания. Стирку необходимо производить с применением хозяйственного мыла или синтетических моющих средств ручным способом или в стиральных машинах. Обеззараживание маски производить путём проглаживания утюгом при температуре глажения хлопковых тканей. Допускаются иные способы обеззараживания масок методом, средствами и по режимам, допущенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь в установленном порядке.

Использовать строго индивидуально!

Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых складских помещениях, обеспечивающих сохранность их внешнего вида и качественных показателей.

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Интернациональная, 5, тел.757026, факс 756555, comintern@comintern.by.