

## Инструкция по применению.

### Повязка (маска) (многоцветная)

Повязка многоцветная с завязками из эластичной тесьмы по боковым сторонам.

Повязка предназначена для индивидуальной защиты органов от пыли, грязи и брызг.

Повязку необходимо надеть так, чтобы она плотно закрывала рот, нос и подбородок. В случае загрязнения или увлажнения повязку необходимо заменить на новую. После снятия повязки обработать руки дезинфицирующим средством или вымыть их с мылом.

Рекомендуемая длительность ношения повязки от 2 до 4 часов.

Повязка может быть использована повторно после стирки и обеззараживания. Стирку необходимо производить с применением хозяйственного мыла или синтетических моющих средств ручным способом или в стиральных машинах. Обеззараживание повязки производить путём проглаживания утюгом при температуре глажения хлопковых тканей.

Использовать строго индивидуально!