

Инструкция по применению.

Наименование изделия: нарукавники медицинского назначения (одноразовые, нестерильные).

Состав материала: нетканый материал «СпанБел» ламинированный волокнистый состав 100% полипропилен.

Описание: верхние и нижние края нарукавников с эластичной тесьмой.

Размеры нарукавников: длина нарукавников не менее 35 см в готовом виде, ширина посередине нарукавника не менее 20 см.

Область применения: нарукавники предназначены для использования в медицинских и лечебных учреждениях.

Способы применения: изделие надевается на руки поверх одежды или без неё. Рекомендованы для одноразового применения. Заменять нарукавники следует по необходимости, в зависимости от износа и повреждений. После применения нарукавники утилизируют согласно действующим предписаниям.

Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.

Использовать по назначению.

Условия хранения: изделие следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, влаги и агрессивных сред, хранить в сухом помещении при относительной влажности не более 80% и температуре от -20 до +40 °С.

Срок хранения: 1 год.

Производитель: ОАО «Коминтерн», Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Интернациональная, 5, тел. 339527, факс 339242, comintern@comintern.by.